









# Gebrauchsanweisung



Medizinprodukt zur symptomatischen Wärmebehandlung von Juckreiz und Schmerzen verursacht durch Insektenstiche und -bisse

# schnell | effektiv | gut verträglich

## Alle Vorteile im Überblick

- Zuverlässige und schnelle Hilfe bei Juckreiz und Schmerzen nach Insektenstichen, ganz ohne lästiges Cremen und Schmieren
- Sehr gute Verträglichkeit bite away® neo wirkt chemiefrei und ist so auch für Kinder und Schwangere geeignet - Stummschaltefunktion für eine ge-
- räuschlose Behandlung von Insektenstichen in der Nacht - Kann wahlweise mit Batterien oder wie-
- deraufladbaren Akkus verwendet werden Leuchtring – bite away® neo verfügt über
- einen Leuchtring an der Spitze für ein leichteres Behandeln von Stichen auch bei Dunkelheit - Multi-Level Sicherheitsfeatures:
- 3. Ausfallsicherer Uberhitzungsschutz Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die gesamte Gebrauchsanwei-

1. Intelligente Temperatursteuerung 2. Unabhängiger Temperaturwächter

sung sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise. Anwendungszweck

## bite away® neo ist ein thermotherapeutisches Medizinprodukt zur topischen

ganz verhindert

symptomatischen Behandlung von Juckreiz und Schmerzen verursacht durch Insektenstiche und -bisse, wie z.B. von Mücken, Wespen, Bienen, Hornissen oder Bremsen. Bei sofortiger Anwendung nach dem Stich/ Biss können die Symptome in der Regel

werden, daher

sollte die

Behandlung der betroffenen Körperstelle so schnell wie möglich erfolgen. Auch bei späterer Anwendung können die Symptome schneller abklingen. Wirkweise Die Anwendung konzentrierter Wärme (lokale Thermotherapie) ist ein physika-

## lisches Wirkprinzip, das auf kurzer, kon-

zentrierter Wärmeeinwirkung auf ein eng begrenztes Hautareal beruht. Selbst ein lokal begrenzter Wärmeeintrag kann ausreichen, eine juckreiz- und schmerzlindernde Reaktion des Körpers auszulösen. bite away® neo wirkt chemiefrei - ausschließlich durch konzentrierte Wärme. bite away® neo ist daher auch für Schwangere und Kinder geeignet.


bite away® neo ist aufgrund der keramischen Kontaktfläche ebenfalls für Allergiker geeignet. **Anwendung** 

Keramische

Kontaktfläche

# Leuchtring

Aufbau des bite away® neo

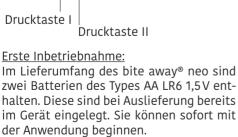

Die Anwendung von bite away® neo ist

- sehr einfach: – Platzieren Sie das Gerät mit der keramischen Kontaktfläche auf dem Stich oder Biss (vorab Stachel entfernen, wenn notwendig) und drücken Sie es leicht an. Wählen Sie anschließend eine Behand-
- lungsdauer durch Betätigen der entsprechenden Drucktaste: 3 Sekunden (Drucktaste I) bei Erst-
- anwendung und für Personen mit empfindlicher Haut 🔳 5 Sekunden (Drucktaste II) für eine
- reguläre Anwendung. – Nach Betätigen der entsprechenden Drucktaste beginnt die Aufheizphase. Während der Aufheizphase wird die keramische Kontaktfläche auf eine Temperatur von ca. 51°C erwärmt. Sobald diese Temperatur erreicht ist, beginnt

die Behandlung. Während der Behand-

lung leuchtet der Leuchtring. Das Gerät schaltet sich nach der gewählten Behandlungsdauer automatisch ab. Zu Beginn der Aufheizphase und am Ende der Behandlung ertönt zusätzlich ein akustisches Signal.

- Entfernen Sie das Gerät vom behandelten Hautareal.

Bei Bedarf ist eine mehrmalige Behandlung desselben Insektenstiches oder -bisses möglich. Bitte halten Sie eine Behandlungspause von mindestens 2 Minuten zwischen den jeweiligen Anwendungen ein. Eine maximale Anzahl von 5 Anwendungen pro Stunde auf demselben Insektenstich oder -biss darf nicht überschritten werden.

# Hinweise zum Gebrauch

Bitte entfernen Sie vor Anwendung des bite away® neo eventuell in der Haut verbliebene Insektenstachel.

bite away® neo ist zur Eigenanwendung durch Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren angezeigt. Bei Kindern unter 12 Jahren oder bei Per-

sonen mit erheblichen Hör-, Seh- und/oder Bewegungseinschränkungen darf das Gerät nur mit Unterstützung eines Erwachsenen verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern

unter 3 Jahren.

Aufgrund des kognitiven Entwicklungsstandes bzw. der Entwicklung des Hautgewebes wird die Behandlung mit dem Gerät für Kinder ab dem 7. Lebensjahr empfohlen. Reinigungsanweisung:

Alle äußeren Flächen des Gerätes können mit einem weichen Tuch gereinigt werden, welches leicht mit Wasser angefeuchtet wurde. Bei offensichtlicher Verschmutzung muss das Gerät gereinigt werden. Dazu benutzen Sie bitte ein weiches Tuch, das mit kaltem Seifenwasser befeuchtet wurde. Wischen Sie alle äußeren Flächen gründlich ab, bis keine Verschmutzung mehr sichtbar ist. Trocknen Sie anschließend diese mit einem Tuch. Wenn das Gerät von einer weiteren

Person verwendet wird, muss die keramische Kontaktfläche vor jeder Anwendung desinfiziert werden. Feuchten Sie dazu ein weiches Tuch gut mit 70%igem Isopropanol an oder verwenden Sie ein herkömmliches Desinfektionstuch auf Basis von 70%igem Isopropanol. Wischen Sie die keramische Kontaktfläche gründlich mit diesem Tuch für 30 Sekunden ab. Lassen Sie die Fläche an der Luft trocknen. Batterie-/Akkuwechsel:



Für den Batterie-/Akkuwechsel wird das Gerät in der Mitte des Gehäuses durch

(AA LR6/HR6 1,2-1,5 V)

eine leichte Drehung geöffnet. Entnehmen Sie die entladenen Batterien/Akkus. Nach dem Einlegen der neuen Batterien oder geladenen Akkus wird das Gehäuse durch eine leichte Drehung geschlossen (siehe Abbildung). Achten Sie beim Schließen des Gehäuses darauf, dass die Taster und die Prägung bite away® neo dieselbe Ausrichtung haben. Ein notwendiger Batterie-/Akkuwechsel

tischen Signals angezeigt. Bitte verwenden Sie Batterien/Akkus des Typs AA LR6 oder HR6 mit einer Spannung von 1,2V-1,5V. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Akkus mit einer Spannung von 1,2 V zu einer geringeren Anzahl

von Anwendungen je Akkuladung führen

wird durch 3-maliges Blinken des Leucht-

rings und ein 3-maliges Ertönen des akus-

<u>Stummschaltung</u> Bei Bedarf können die akustischen Signale ausgeschaltet werden (Stummschaltung).

kann.

Zur Aktivierung oder Deaktivierung der Stummschaltung halten Sie jeweils beide Drucktasten zeitgleich für 3 Sekunden gedrückt. Der Wechsel in den entsprechenden Modus wird durch die folgenden Signale angezeigt. 2x Blinken des Stummschaltung Leuchtrings aktiviert 2x Blinken des Stummschaltung

deaktiviert

Bitte beachten Sie, dass während der Stummschaltung des bite away® neo keine akustischen Signale bei Fehlern ertönen. <u>Signale und Fehlerbehebung</u>

### - Behandlungstempe-3x Blinken des

Leuchtrings 3x akustisches Signal

5x Blinken des

Leuchtrings

Leuchtrings

Signal

2x akustisches

ratur wird nicht erreicht. – Wechseln Sie die Bat-

terien/Akkus

Akkuwechsel"). Funktionsstörung: Ursache kann eine fehlerhafte Anwenduna

"Abschnitt Batterie-/

(siehe

5x akustisches Signal

- sein, z.B. Auslösen und Betreiben des Gerätes gegen Luft. Sollte diese Fehlermeldung trotz korrekter Anwendung wie-
- derholt auftreten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreiber von bite away® neo.

bite away® neo heizt nicht auf/ funktioniert nicht

- Wechseln Sie die Batterien/Akkus (siehe "Abschnitt Batterie-/ Akkuwechsel").
- Sollte dieser Fehler trotz voller Batterien/ Akkus erneut auftreten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreiber von bite away® neo.

## Warnhinweise

bite away® neo darf nicht angewendet werden auf bzw. bei

- anaphylaktischer Reaktion
- Augen und Augenlidern
- Schleimhäuten
- offenen Wunden, verletzter Haut
- Verbrühung oder Verbrennung der Haut
- Erfrierungen der Haut
- Tumoren und bösartigen Veränderungen der Haut – bekannter erhöhter Algesie (erhöhtes
- bei Small-Fibre-Schmerzempfinden) Neuropathie, Allodynie, Hyperalgesie - Personen mit bekannter eingeschränk-
- ter Schmerz- und Temperaturempfindlichkeit. Überempfindlichkeitsreakakuten

tionen (anaphylaktische Reaktion) nach einem Insektenstich oder -biss ist die Anwendung von bite away® neo nicht angezeigt. bite away® neo stellt keinen Ersatz für eine Notfallbehandlung dar. Wenden Sie sich zur Notfallbehandlung unmittelbar bei Auftreten der ersten Anzeichen (z.B. verstärktes Hautjucken, -rötung, -schwel-Quaddelbildung, Schwindel, lung und Übelkeit, Atemnot, Blutdruckabfall oder -anstieg) an einen Arzt.

In folgenden Fällen sollte ärztlicher Rat eingeholt werden: – anhaltende Beschwerden unter der An-

- wendung von bite away® neo.
- sich verschlimmernde Beschwerden unter der Anwendung von bite away® neo. Bis zur Klärung sollten Sie das Produkt nicht weiter anwenden.
- Zeckenbisse, da dieses Spinnentier Krankheitserreger wie Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen kann. bite away® neo kann die Übertragung von

Krankheitserregern durch Insektenstiche oder -bisse nicht verhindern oder ihnen vorbeugen. Bei Hinweisen auf eine, durch einen Insektenstich oder -biss, übertragene Krankheit sollte unbedingt ärztlicher Rat eingeholt werden. Darüber hinaus darf das Gerät nicht un-

mittelbar nach dem Auftragen von Salben, Cremes, Lotionen und anderen Zubereitungen auf der zu behandelnden Stelle angewendet werden. Im Einzelfall kann die Behandlungstem-

peratur als unangenehm wahrgenommen werden. Bei sensitiver Haut kann eine kurzzeitige

Hautrötung nach Anwendung auftreten. In sehr seltenen Fällen kann es bei Anwendern mit empfindlichem Hauttyp zu einer Hautreizung kommen. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Beschä-

digung, offensichtlicher Fehlfunktion oder mit geöffnetem Gehäuse. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien oder Akkus. Jegliche Änderung an bite away® neo ist nicht erlaubt. Bitte beachten Sie bei der Anwendung an Kindern, dass bite away® neo kleine Tei-

le enthält, die von Kindern unter 3 Jahren verschluckt werden können und somit eine Erstickungsgefahr darstellen. Zulässige Umgebungsbedingungen Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung

### geschützt, trocken und sauber lagern. Bitte beachten Sie die folgenden zulässi-

gen Umgebungsbedingungen. Umgebungstempera-Betrieb tur 5°C bis 40°C Relative Luftfeuchte

- Luftdruck von 700 hPa bis 1060 hPa Für den Trans---25°C bis 5°C port und die

Lagerung ohne Verpackung\*

Für den Trans-

port und die

Lagerung mit

Verpackung\*

- 5°C bis 35°C bei einer relativen Luftfeuchte bis zu 90%, ohne Kondensation

15% bis 90%, nicht

kondensierend

druck bis zu 50 hPa - Luftdruck von 700 hPa bis 1060 hPa

– 35°C bis 70°C bei

einem Wasserdampf-

- Umgebungstemperatur 5°C bis 40°C - Relative Luftfeuchte 5% bis 85%
- Luftdruck von 700 hPa bis 1060 hPa \* Bitte beachten Sie die möglicherweise abweichenden Angaben vom Hersteller

Batterien/Akkus zu Lagerungs-

bedingungen. Verwenden Sie die Batterien/Akkus nicht über das auf den Batterien/Akkus angegebene Haltbarkeitsdatum hinaus. Um eine

Beschädigung des bite away® neo durch Auslaufen von Batterien und Akkus zu ver-

meiden, sollten diese bei längerem Nichtbenutzen herausgenommen werden. Bitte beachten Sie die Handhabungshinweise auf den von Ihnen verwendeten

Batterien und Akkus. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von Batterien. Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll. Entsorgen Sie das Gerät am Ende der

zu erwartenden Betriebslebensdauer von 5 Jahren gemäß der lokalen Bestimmung zur Entsorgung von Elektroaltgeräten.



Hersteller:

mibeTec GmbH Münchener Straße 15 06796 Brehna Deutschland

Tel.: +49 (0) 800/162 35 09 Fax: +49 (0) 34954/247 271 79

E-Mail:

contact.mibetec@dermapharm.com

www.bite-away.com

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt bzw. dessen Funktion an den Hersteller oder Vertreiber. Bitte melden Sie alle im Zusammenhang

mit bite away® neo aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse an den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Stand der Information: 2021-09

## **C€0123**



Gebrauchsanweisung folgen



Medizinprodukt

packung

Zulässige

nung



neneinstrahlung geschützt und trocken lagern/vor Nässe schützen. Zulässige Umgebungstemperatur für den Transport

und die Lagerung mit Ver-

Das Gerät vor direkter Son-



<sup>1060 hPa</sup> Zulässiger Luftdruck den Transport und die Lagerung mit Verpackung

relative



feuchte für den Transport und die Lagerung mit Verpackung Eindeutige Produktken-



UDI

Artikelnummer

Herstelldatum



Charge siehe Gerät



entsorgen/Entsorgung gemäß der lokalen Bestimmung zur Entsorgung von Elektroaltgeräten

Nicht über den Hausmüll

Technische Daten: geeigneter Batterie-/Akkutyp



Die keramische Kontakt-

fläche ist Anwendungs-

teil Typ BF gemäß DIN



EN 60601-1 Geschützt gegen Staubeintritt (staubdicht) und

geschützt gegen Strahl-

wasser aus beliebigem



Winkel Stummschaltefunktion für eine geräuschlose Behandlung von Insektenstichen und -bissen



2x AA LR6 1,5V Batterien im Lieferumfang enthal-





Chemiefreie Behandlung

Juckreiz

Insektenstich



Trotzdem sollten besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden: bite away® neo ist vorgesehen für die Verwendung in Umgebung in Bereichen der

häuslichen Gesundheitsfürsorge.

Die Verwendung dieses Geräts unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Be-

triebsweise zur Folge haben könnte. Die Verwendung von anderem Zubehör, als jenem, welches der Hersteller dieses Geräts festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störaussendung oder eine geminderte elektro-

magnetische Störfestigkeit des Geräts zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen. Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (Funkgeräte), einschließlich deren Zubehör wie z.B. Antennenkabel und externe Antennen,

sollten nicht in einem geringeren Abstand als 30 cm zu den vom Hersteller bezeichneten Teilen und Leitungen des bite away® neo verwendet werden. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Geräts führen.

Entsprechend den Vorgaben der 60601-1-2:2014 kann die technische Beschreibung in digitaler Form und englischer oder deutscher Sprache bei der mibeTec GmbH (Adresse befindet sich in der Gebrauchsanweisung) angefordert werden.