

Medizinprodukt zur symptomatischen Wärmebehandlung von Juckreiz und Schmerzen verursacht durch Insektenstiche und -bisse

schnell | effektiv | gut verträglich

Alle Vorteile im Überblick

- Zuverlässige und schnelle Hilfe bei Juckreiz und Schmerzen nach Insektenstichen, ganz ohne lästiges Cremen und Schmieren
- Sehr gute Verträglichkeit bite away® two wirkt chemiefrei und ist so auch für Kinder und Schwangere geeignet
- Stummschaltefunktion für eine geräuschlose Behandlung von Insektenstichen in der Nacht
- Kann wahlweise mit Batterien oder wiederaufladbaren Akkus verwendet werden
- Multi-Level Sicherheitsfeatures:
 - 1. Intelligente Temperatursteuerung
 - 2. Unabhängiger Temperaturwächter
 - 3. Ausfallsicherer Überhitzungsschutz

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.

Anwendungszweck

bite away® two ist ein thermotherapeutisches Medizinprodukt zur topischen symptomatischen Behandlung von Juckreiz und Schmerzen verursacht durch Insektenstiche und -bisse, wie z.B. von Mücken, Wespen, Bienen, Hornissen oder

Bei sofortiger Anwendung nach dem Stich/Biss können die Symptome in der Regel ganz verhindert werden, daher sollte die Behandlung der betroffenen Körperstelle so schnell wie möglich erfolgen. Auch bei späterer Anwendung können Begleitsymptome wie Juckreiz und Schmerzen effektiv gelindert werden und schneller abklin-

Wirkweise

Die Anwendung konzentrierter Wärme (lokale Thermotherapie) ist ein physikalisches Wirkprinzip, das auf kurzer, konzentrierter Wärmeeinwirkung auf ein eng begrenztes Hautareal beruht. Selbst ein lokal begrenzter Wärmeeintrag kann ausreichen, eine juckreiz- und schmerzlindernde Reaktion des Körpers auszulösen.


bite away® two wirkt chemiefrei - ausschließlich durch konzentrierte Wärme.

bite away® two ist daher auch für Schwangere und Kinder geeignet. bite away® two ist aufgrund der keramischen Kon-

taktfläche ebenfalls für Allergiker geeignet.

Keramische

Anwendung Aufbau des bite away® two:

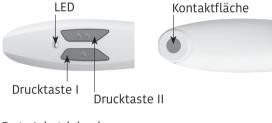

Erste Inbetriebnahme: Im Lieferumfang des bite away® two sind zwei

Batterien des Typs AAA LR03 1,5 V enthalten. Diese sind bei Auslieferung bereits im Gerät eingelegt. Sie können sofort mit der Anwendung beginnen. Die Anwendung von bite away® two ist sehr ein-

fach: – Platzieren Sie das Gerät mit der keramischen

- Kontaktfläche auf dem Stich oder Biss (vorab Stachel entfernen, wenn notwendig) und drücken Sie es leicht an. - Wählen Sie anschließend eine Behandlungs-
- dauer durch Betätigen der entsprechenden Drucktaste: 3 Sekunden (Drucktaste I) bei Erstanwen
 - dung und für Personen mit empfindlicher •• 5 Sekunden (Drucktaste II) für eine reguläre Anwendung

- Nach Betätigen der entsprechenden Drucktaste

- beginnt die Aufheizphase. Während der Aufheizphase wird die keramische Kontaktfläche auf eine Temperatur von ca. 51°C erwärmt. Sobald diese Temperatur erreicht ist, beginnt die Behandlung. Während der Behandlung leuchtet die LED. Das Gerät schaltet sich nach der gewählten Behandlungsdauer automatisch ab. Zu Beginn der Aufheizphase und am Ende der Behandlung ertönt zusätzlich ein akustisches Signal. - Entfernen Sie das Gerät vom behandelten Haut-
- areal. Bei Bedarf ist eine mehrmalige Behandlung des-

selben Insektenstiches oder -bisses möglich. Bitte halten Sie eine Behandlungspause von mindestens 2 Minuten bei Behandlung desselben Stiches oder Bisses zwischen den jeweiligen Anwendungen ein. Eine direkt nachfolgende Behandlung eines weiteren Insektenstiches oder -bisses auf einem anderen Hautareal ist nach der ersten Behandlung mit bite away® two problemlos möglich. Hinweise zum Gebrauch

Bitte entfernen Sie vor Anwendung des bite away®

stachel. bite away® two ist zur Eigenanwendung durch Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren angezeigt.

two eventuell in der Haut verbliebene Insekten-

Bei Kindern unter 12 Jahren ist das Gerät nur mit Unterstützung eines Erwachsenen anzuwenden. Personen, die die visuellen oder akustischen Sig-

nale des Geräts nur eingeschränkt wahrnehmen können, sollten sich bei der Anwendung durch

einen Erwachsenen unterstützen lassen. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern unter 3 Jahren. Kinder unter 7 Jahren können häufig noch nicht den Zusammenhang zwischen einer kurzen Hit-

zebehandlung und deren positiven Nutzen ver-

stehen. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig, ob die

symptomatische Behandlung mit bite away® two



GI04022-01



für Ihr Kind geeignet ist. Bitte bedenken Sie auch, dass Kinderhaut noch in der Entwicklung ist und damit sensibler auf Wärmereize reagieren kann.

Reinigung und Desinfektion:

Alle äußeren Flächen des Geräts können mit einem weichen Tuch gereinigt werden, welches leicht mit Wasser angefeuchtet wurde. Bei offensichtlicher Verschmutzung muss das Gerät gereinigt werden. Dazu benutzen Sie bitte ein weiches Tuch, das mit 70%igem Isopropanol befeuchtet wurde. Wischen Sie alle äußeren Flächen gründlich ab, bis keine Verschmutzung mehr sichtbar ist. Trocknen Sie diese anschließend mit einem Tuch.

werden, bevor das Gerät von einer anderen Person verwendet wird. Feuchten Sie dazu ein weiches Tuch gut mit 70%igem Isopropanol an oder verwenden Sie ein herkömmliches Desinfektionstuch auf Basis von 70%igem Isopropanol. Wischen Sie die keramische Kontaktfläche gründlich mit diesem Tuch für 30 Sekunden ab. Lassen Sie die Fläche an der Luft trocknen.

Die keramische Kontaktfläche muss desinfiziert

Batterie-/Akkuwechsel:



LR03 oder AAA HR03 oder 1,2-1,5 V HR11/45

Für den Batterie-/Akkuwechsel muss die Batteriekappe geöffnet werden, indem die Batteriekappe an der Markierung gedrückt und gleichzeitig in Pfeilrichtung (siehe Abbildung) geschoben wird. Entnehmen Sie die beiden entladenen Batterien/ Akkus. Die neuen Batterien oder geladenen Akkus müssen entsprechend der Kennzeichnung (siehe Abbildung) in das Gerät eingelegt werden. Beachten Sie dabei die angezeigte Polrichtung der Batterien/Akkus. Nach dem Einlegen der Batterien/ Akkus muss die Batteriekappe wieder vollständig aufgeschoben werden.

Ein notwendiger Batterie-/Akkuwechsel wird durch 3-maliges Blinken der LED und ein 3-maliges Ertönen des akustischen Signals angezeigt. Bitte verwenden Sie Batterien/Akkus des Typs AAA

LR03, HR03 oder HR11/45 mit einer Spannung von 1,2 V bis 1,5 V. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Akkus mit einer Spannung von 1,2 V zu einer geringeren Anzahl von Anwendungen je Akkuladung führen kann.

Stummschaltung:

Bei Bedarf können die akustischen Signale ausgeschaltet werden (Stummschaltung). Zur Aktivierung oder Deaktivierung der Stumm-

schaltung halten Sie jeweils beide Drucktasten zeitgleich für 3 Sekunden gedrückt. Der Wechsel in den entsprechenden Modus wird durch die folgenden Signale angezeigt. 2x Blinken der LED | Stummschaltung aktiviert

| EX Buillett del EEB | bearing antiviere | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|
| 2x Blinken der LED 2x akustisches Signal | Stummschaltung deaktiviert | | | |
| Bitte beachten Sie, dass nicht alle Fehler stumm- | | | | |

geschaltet werden können (Details dazu siehe Tabelle "Signale und Fehlerbehebung"). Signale und Fehlerbehebung:

Behandlungstemperatur 3x Blinken der LED 3x akustisches wird nicht erreicht.

| on anastrocites | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| Signal | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Batterie/Akku zu schwach:

Wechseln Sie die Batte-(siehe rien/Akkus Ab-"Batterie-/Akkuschnitt wechsel"). - Funktionsstörung: 5x Blinken der LED Ursa-

5x akustisches Signal (ertönt auch während der Stummschaltung)

Anwendung sein, z.B. Auslösen und Betreiben des Geräts gegen Luft. Sollte diese Fehlermeldung trotz korrekter Anwendung

che kann eine fehlerhafte

wiederholt auftreten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreiber von bite away® two. – Wechseln Sie die Batterien/Akkus

funktioniert nicht

away®

heizt nicht auf /

two

bite

- (siehe Abschnitt "Batterie-/Akkuwechsel").
- Sollte dieser Fehler trotz voller Batterien/Akkus erneut auftreten, wenden
- Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreiber von bite away® two. bite away® two darf nicht angewendet werden auf

bzw. bei

Warnhinweise

– anaphylaktischer Reaktion

- Augen und Augenlidern – Schleimhäuten
- offenen Wunden, verletzter Haut (z.B. Blasen)
- Verbrühung oder Verbrennung der Haut
- Erfrierungen der Haut – Tumoren und bösartigen Veränderungen der
- Haut – bekannter erhöhter Algesie (erhöhtes Schmerzempfinden) bei Small-Fibre-Neuropathie,
- Allodynie, Hyperalgesie – Personen mit bekannter eingeschränkter

Schmerz- und Temperaturempfindlichkeit. Bei akuten Überempfindlichkeitsreaktionen (anaphylaktische Reaktion) nach einem Insektenstich oder -biss ist die Anwendung von bite away® two

nicht angezeigt. bite away® two stellt keinen Er-

satz für eine Notfallbehandlung dar. Wenden Sie sich zur Notfallbehandlung unmittelbar bei Auftreten der ersten Anzeichen (z.B. verstärktes Hautjucken, -rötung, -schwellung und Quaddelbildung, Schwindel, Ubelkeit, Atemnot, Blutdruckabfall oder -anstieg) an einen Arzt.

In folgenden Fällen sollte ärztlicher Rat eingeholt

- anhaltende Beschwerden unter der Anwendung von bite away® two.
- sich verschlimmernde Beschwerden unter der Anwendung von bite away® two. Bis zur Klärung sollten Sie das Produkt nicht weiter anwenden.
- Zeckenbisse, da dieses Spinnentier Krankheitserreger wie Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen kann.

bite away® two kann die Übertragung von Krankheitserregern durch Insektenstiche oder -bisse nicht verhindern oder ihnen vorbeugen. Bei Hinweisen auf eine, durch einen Insektenstich oder -biss, übertragene Krankheit sollte unbedingt ärztlicher Rat eingeholt werden.

Darüber hinaus darf das Gerät nicht unmittelbar nach dem Auftragen von Salben, Cremes, Lotionen und anderen Zubereitungen auf der zu behandelnden Stelle angewendet werden, da mögliche Wechselwirkungen mit Inhaltsstoffen dieser Produkte nicht ausgeschlossen werden können.

Im Einzelfall kann die Behandlungstemperatur als unangenehm wahrgenommen werden.

Bei sensitiver Haut kann eine kurzzeitige Hautrötung nach Anwendung auftreten. In sehr seltenen Fällen kann es bei Anwendern mit empfindlichem Hauttyp zu einer Hautreizung kommen.

Benutzen Sie das Gerät nicht bei Beschädigung, offensichtlicher Fehlfunktion oder mit geöffnetem Gehäuse. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien oder Akkus.

Jegliche Änderung an bite away® two ist nicht erlaubt.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bitte beachten Sie, dass bite away® two Kleinteile enthält, die von Kindern unter 3 Jahren verschluckt werden können und somit eine Erstickungsgefahr

Zulässige Umgebungsbedingungen Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung ge-

schützt, trocken und sauber lagern. Bitte beachten Sie die folgenden zulässigen Um-

gebungsbedingungen. Pelative Luftdruck

| | tur [°C] | Luftfeuch- te [%] | [hPa] | | | |
|--|----------|----------------------|---------|--|--|--|
| Betrieb | | 15 bis 85 | 700 bis | | | |
| Transport* | 5 bis 40 | | | | | |
| Lagerung* | | | 1000 | | | |
| * Bitte beachten Sie die möglicherweise abweichender | | | | | | |

Angaben vom Hersteller der Batterien/Akkus zu Lagerungsbedingungen. Bitte beachten Sie die Handhabungshinweise auf

den von Ihnen verwendeten Batterien und Akkus. Verwenden Sie die Batterien/Akkus nicht über das auf den Batterien/Akkus angegebene Haltbarkeitsdatum hinaus. Um eine Beschädigung des bite away® two durch Auslaufen von Batterien und Akkus zu vermeiden, sollten diese bei längerem Nichtbenutzen herausgenommen werden. bite away® two hat eine zu erwartende Betriebs-

lebensdauer von mindestens 5 Jahren. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Be-

stimmungen zur Entsorgung von Batterien. Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt

werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten.



@ mibeTec GmbH

Münchener Straße 15 06796 Brehna Deutschland Tel.: +49 (0) 800/162 35 09

E-Mail: contact.mibetec@dermapharm.com

www.bite-away.com

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt


bzw. dessen Funktion an den Hersteller oder Ver-Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit bite away® two aufgetretenen schwerwiegenden Vor-

kommnisse an den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land. Stand der Information: 2022-12



Gebrauchsanweisung befolgen



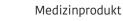





Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und trocken lagern / vor Nässe schützen.



Zulässige Umgebungstemperatur



Zulässiger Luftdruck



Zulässige relative Luftfeuchte



REF

Eindeutige Produktkennung



Artikelnummer





Herstelldatum




LOT

Charge siehe Gerät Nicht über den Hausmüll entsorgen/ Entsorgung gemäß den lokalen Be-

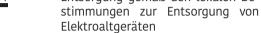

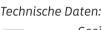

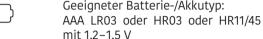







IP42: Geschützt gegen Eindringen von Fremdkörpern (1 mm) und gegen schräg fallendes Tropfwasser



räuschlose Behandlung von Insektenstichen und -bissen 2x AAA LR03 1,5 V Batterien im Lie-

Stummschaltefunktion für eine ge-



ferumfang enthalten



Insektenstich

Juckreiz





Chemiefreie Behandlung

Dieses Medizinprodukt entspricht dem EMV-Standard IEC 60601-1-2:2020. Trotzdem sollten besondere Vorsichtsmaßnah-

men beachtet werden: Für die Anwendung von bite away® two ist die

Umgebung in Bereichen der häuslichen Gesundheitsfürsorge vorgesehen. Die Verwendung dieses Geräts unmittelbar neben

anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben Die Verwendung von anderem Zubehör, als jenem, welches der Hersteller dieses Geräts festgelegt

oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Storaussendung oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Geräts zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen. Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (Funkgeräte), einschließlich deren Zubehör wie z.B. Anten-

nenkabel und externe Antennen, sollten nicht in einem geringeren Abstand als 30 cm zu den vom Hersteller bezeichneten Teilen und Leitungen des bite away® two verwendet werden. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Geräts führen. Entsprechend den Vorgaben 60601-1-2:2020 kann die technische Beschreibung

in digitaler Form, in englischer oder deutscher Sprache bei der mibeTec GmbH (Adresse befindet sich in der Gebrauchsanweisung) angefordert werden.