

## Schnell und effektiv gegen Insektenstiche


bite away® ist ein elektronisches Gerät zur Linderung von Juckreiz, Schmerzen und Schwellungen nach Insektenstichen und -bissen.

- ✓ Patentiertes Medizinprodukt
- ✓ Dermatologisch getestet
- ✓ Ohne Chemie – wirkt ausschließlich durch konzentrierte Wärme im Bereich um 51 °C
- ✓ Einfach und schnell einsetzbar
- ✓ Auch für Schwangere, Allergiker und Kinder\* geeignet
- ✓ Bis zu 300 Anwendungen mit einem Satz Batterien
- ✓ Keramische Kontaktfläche
- ✓ Handliches Format in Stiftgröße



## Einfache Anwendung, zuverlässige Hilfe

bite away® wird mit der keramischen Kontaktfläche auf dem Stich oder Biss platziert. Nach einmaligem Betätigen einer der beiden Tasten (3 Sekunden bei Erstanwendung und für Personen mit empfindlicher Haut / 5 Sekunden für eine reguläre Anwendung) wird eine Temperatur im Bereich um 51 °C erreicht und für die ausgewählte Zeit gehalten.

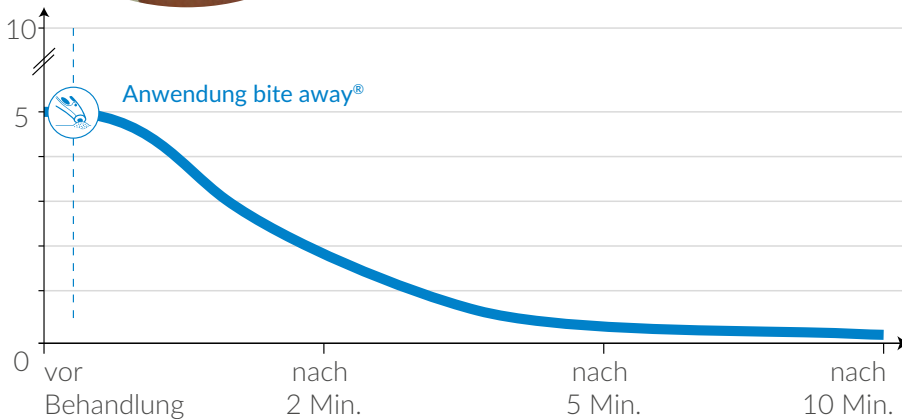

Rückgang der Juckreizintensität 2, 5 und 10 Minuten nach der Behandlung mit bite away®. Gemessen anhand einer visuellen Analogskala.\*\*

## Bestechend gut – die Nummer 1 bei Insektenstichen

Auch im Produkttest bei **Vergleich.org** hat bite away® überzeugt: Der praktische Begleiter hat mit Note 1,3 als bestes Gerät im Test abgeschnitten und wurde 2018 zum dritten Mal in Folge zum Testsieger gekürt.

bite away® ist in der Apotheke oder bei Rossmann erhältlich – online und vor Ort.



\* Eigenanwendung ab 12 Jahren \*\* Studie Müller et al. 2011